

nanny

Nanny – Moniteur
respiratoire du nourrisson



Surveillance **votre trésor!**

Chers parents (maman et papa)

Vous pouvez vous endormir tranquillement, votre bébé est surveillé par Nanny

☺ Nanny est un produit fabriqué dans l'union européenne, qui vous rassurera lors de la prise en charge quotidienne de votre trésor.

☺ Nanny protège votre bébé devant les risques de mort subite du nourrisson (MSN), l'étouffement et le vomissement.

☺ L'appareil électronique Nanny avec la haute sensibilité de son détecteur surveille, et indique en permanence la fréquence respiratoire de votre bébé.

☺ Nanny est une aide indispensable pour une surveillance des nourrissons ayant un faible poids de naissance, avec des complications, mais également pour un bébé en bonne santé.

☺ En cas d'un état critique constaté Nanny prévient par une alarme très puissante.

☺ L'appareil électronique Nanny est alimenté par deux piles R6/AA (non rechargeable).

☺ Nanny signale automatiquement les piles déchargées.

☺ L'installation et l'entretien est facile.

☺ Pour une utilisation plus confortable dans plusieurs endroits il est possible d'acheter un deuxième détecteur.

☺ voyant vert clignotant – confirme les mouvements (respiratoires) du bébé

☹ voyant rouge clignotant – alarme

🔋 Pile rouge clignotant – il faut changer les piles






nanny




Moniteur respiratoire du nourrisson

- ☺ Nanny a passé les tests cliniques avec succès
- ☺ Nanny est utilisé dans les services de néonatalogie et les pouponnières
- ☺ Nanny est un appareil médical certifié selon la législation de l'Union européenne
- ☺ Nanny ne limite pas le bébé dans ses mouvements et n'émet pas d'ondes nuisibles

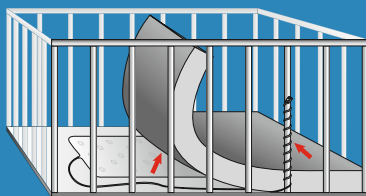

L'utilisation de la Nanny est simple : vous installez le détecteur d'enregistrement sous le matelas du bébé.

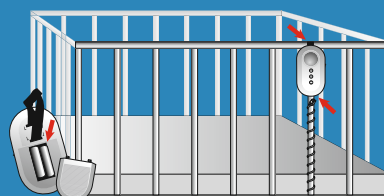

Fixez l'appareil sur le lit, vous pouvez également le brancher dans une pièce voisine à l'aide d'une rallonge (fournie).



Après avoir couché le bébé, vous allumez l'appareil à l'aide du bouton. Nanny vous alerte systématiquement en cas de risque vital de l'enfant.

Qu'est ce que c'est « La mort subite du nourrisson » ?

La mort subite du nourrisson (MSN) est la cause la plus fréquente de décès du nourrisson jusqu'à 6 mois. Le vomissement et l'étouffement du bébé après s'être alimenté présentent également un risque considérable. Nanny enregistre et montre la baisse de la fréquence respiratoire du bébé, causé par une complication de santé, par l'organisme affaibli, lors de faible poids de naissance ou pendant des états malades ou un bébé sain. Les bébés ont parfois une respiration irrégulière qui reste sans danger. Mais les difficultés respiratoires sont un indicateur sûr pendant les allergies ou les états qui demandent une intervention urgente. Ce moniteur surveille également la respiration régulière et irrégulière du bébé. Nanny émet une alarme d'urgence après 20 secondes depuis la dernière inspiration de l'enfant ou s'il n'enregistre pas 8 inspirations par minute au minimum (symptôme d'apnée prolongée).

Nanny est utilisé dans les familles, les maternités, les services de néonatalogie jusqu'à 15 kg (environ 1 an).

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
Le producteur déconseille d'acheter l'appareil d'occasion ou de le louer. En cas d'une utilisation inappropriée l'appareil peut perdre en fiabilité ce qui peut avoir des conséquences graves pour votre bébé.



Fabricant:

JABLOTRON ALARMS a. s.
Pod Skalkou 33, 466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic, tel.: 483 559 911
www.jablotron.cz

Cachet du distributeur



JABLOTRON